

### 女性導尿・浣腸シミュレータⅡ

型番 MW52 | コードNo 11433-000

|                                |    |             |    |
|--------------------------------|----|-------------|----|
| 成人腰部モデル                        | 1台 | 浣腸用直腸部      | 1点 |
| 性器部ユニット<br>(男性器又は女性器)          | 1式 | イルリガートル     | 1点 |
| 導尿用弁<br>(1個は性器部ユニットに組込済、2個は付属) | 3個 | ホース(給水・排水用) | 3本 |
|                                |    | 潤滑剤(オリーブ油)  | 1点 |
|                                |    | 取扱説明書       |    |

### 男性導尿・浣腸シミュレータ

型番 MW2A | コードNo 11381-100

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 本体  | 成人性器部モデル            |
| 大きさ | 約 W34×D33×H24cm     |
| 重量  | 3.5kg(男性) 3.4kg(女性) |
| 材質  | 軟質特殊樹脂製             |

### 女性導尿・浣腸シミュレータからの皮膚 買替プラン

コードNo 11433-000-99

|                |    |
|----------------|----|
| 性器部皮膚Ⅲ(女性用)    | 1点 |
| 尿道口部Ⅲ(女性用)クリップ | 2個 |
|                | 1個 |

交換部品

女性用



性器部皮膚Ⅲ(女性用) 11433-010

※クリップが付属しています



尿道口部Ⅲ(女性用) 11433-020 2個組

男性用



性器部皮膚Ⅱ(男性用) 11381-410



尿道口部Ⅱ(男性用) 11381-510 2個組

男女共通




導尿用弁(男女共通) 11381-300 6個組



潤滑剤(導尿・浣腸他用) 11381-800 1点

# 女性導尿・浣腸シミュレータⅡ 男性導尿・浣腸シミュレータ

リアルだから身につく「安全で確かな技術」

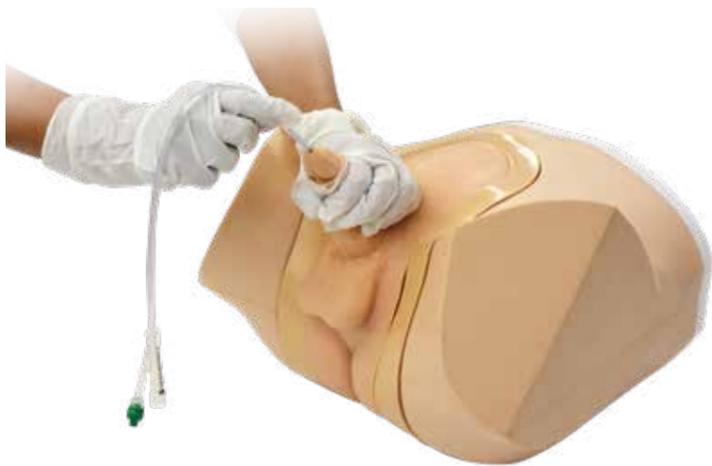

✓質感を  
リニューアルしました



関連製品

### 男女導尿・浣腸モデル 装着式

|         |                     |
|---------|---------------------|
| 型番 MW53 | コードNo 11434-000(男性) |
| 型番 MW54 | コードNo 11435-000(女性) |
| 型番 MW55 | コードNo 11436-000(男女) |



● 製品は絶えず改良を続けておりますので、仕様・外観など予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。  
● このパンフレットに掲載の文章・情報・写真等については、許可なく無断転載・転用・コピーなどは固くお断りいたします。

2024.06

取扱店

製造元

**KYOTO KAGAKU** URL <https://www.kyotokagaku.com/jp/>  
e-mail [rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp](mailto:rw-kyoto@kyotokagaku.co.jp)

京都本社・工場  
〒612-8388 京都市伏見区北寝小屋町15番地  
TEL.075-605-2510 (直通) FAX.075-605-2519

東京支店  
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目26番6号  
NREG本郷三丁目ビル2階  
TEL.03-3817-8071 (直通) FAX.03-3817-8075

# “ほぼヒト”

演習中に「実際のヒトとは違います」という説明が必要ないくらい、質感と構造にこだわりました。

導尿だけじゃない、  
色々な場面で

**導尿** 外尿道口の確認・消毒  
カテーテルの挿入・排尿の確認  
カテーテルの抜去


**浣腸** カテーテルの肛門への挿入  
カテーテルの適切な長さの確認  
浣腸液の注入

**排泄の援助** 必要な配慮・患者さんの気持ちの理解

**陰部洗浄** 微温湯での陰部洗浄

**性教育** コンドームの装着

## Point

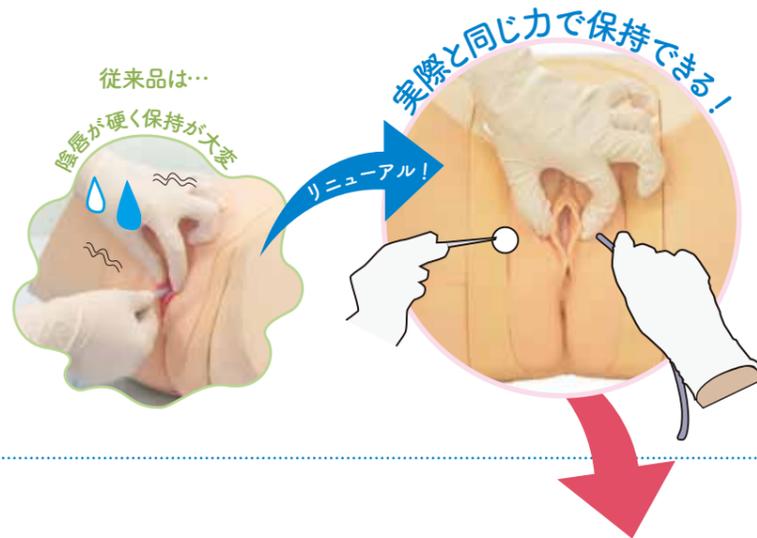


## リアルな挿入感覚

男性の尿道の抵抗・陰茎の角度調整、女性の尿道口への挿入感覚も忠実に再現しています。

## 構造の再現

実際のカテーテル挿入と同様の長さの挿入でき、バルーンを膨らませて留置できます。浣腸の挿入長も実際と同様です。

## 浣腸

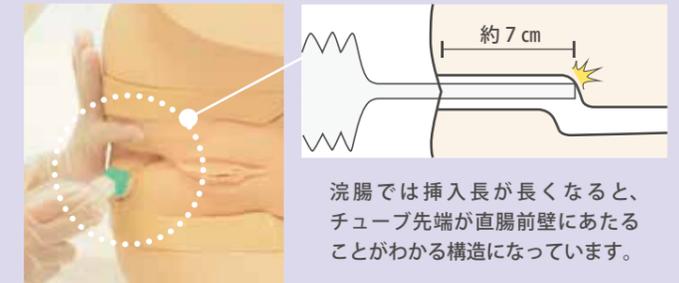

PMDA 医療安全情報 No.34 グリセリン浣腸の取扱い時の注意について

チューブの挿入する長さは、目安として5~6cmとされていますが、抵抗を感じたら無理に進めず、少し引き戻しましょう。

## 無菌操作が継続できる

### 外尿道口を露出

女性



### 消毒



### カテーテルの挿入



### バルーンカテーテルの留置・固定



男性



## Q&A

- Q. カテーテル挿入時にいつも使っている潤滑剤を使用しているの？  
A. 付属の潤滑剤をご使用ください。
- Q. 旧型の性器部皮膚IIと新型の尿道口部IIIは一緒に使えますか？  
A. 形状が異なるため、一緒にご使用できません。

## 安全なバルーンカテーテルの留置を習得

カテーテルを正しく挿入し膀胱まで達すると排尿を確認できます。

医療安全情報 No.80 No.142 膀胱留置カテーテルによる尿道損傷

膀胱留置カテーテルを留置する際、尿の流出を確認せずバルーンを拡張し、尿道を損傷した事例が報告されています。